










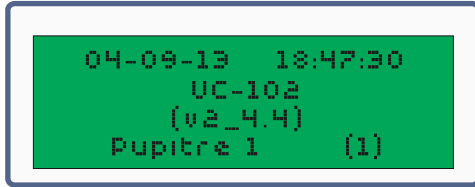
- 1 TECLADO NUMÉRICO
- 2 Pulsador INTERCOMUNICACIÓN
- 3 Pulsador PRESENCIAS
- 4 Pulsador DESVÍO
- 5 Pulsador VALIDACIÓN
- 6 Pulsador ANULACIÓN
- 7 Pulsador FUNCIÓN
- 8 Pulsador HABLE / ESCUCHA
- 9 DISPLAY
- 10 ALTAVOZ
- 11 MICRÓFONO

ÍNDICE

DISPLAY DE ESPERA	Pag. 3
VISUALIZACIÓN LLAMADAS	Pag. 3
ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS	Pag. 4
LLAMADA DIRECTA A UNA HABITACIÓN	Pag. 5
LLAMADA POR SELECCIÓN DEL NOMBRE DE HABITACIÓN	Pag. 6
VISUALIZACIÓN Y ATENCIÓN PRESENCIAS	Pag. 7
CONFIGURACIÓN AJUSTES Y TEST DEL SISTEMA-	Pag. 8
 DESVÍO DE LLAMADAS AL TELÉFONO	Pag. 9
 ANULACIÓN DE DESVÍO AL TELÉFONO	Pag. 9
 ATENCIÓN DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELÉFONO	Pag.10
 DESVÍO DE LLAMADAS AL PUPITRE UC-102	Pag. 11
 ANULACIÓN DEL DESVÍO DE LLAMADAS AL PUPITRE UC-102	Pag. 11
 ATENCIÓN DE LLAMADAS DESDE EL PUPITRE UC-102	Pag. 12
 DESVÍO DE LLAMADAS AL SECUNDARIO UC-104	Pag. 13
 ANULACIÓN DEL DESVÍO DE LLAMADAS AL SECUNDARIO UC-104	Pag. 13
 ATENCIÓN DE LLAMADAS CON DESVÍO AL SECUNDARIO UC-104	Pag. 14

UTILIZACIÓN





DISPLAY DE ESPERA



En espera, la pantalla indica:

- Fecha - Hora
- Tipo de central
- Versión del software
- Identificador del pupitre

Si existe:

- Indicación de desvío   
- Indicación de presencias activadas 
- Indicación en el pupitre receptor del desvío **(D)**

VISUALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES

Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando:


-TIPO DE LLAMADA:

- Llamada habitación
- Llamada cama1
- Llamada cama2
- Llamada Aux.
- Llamada Baño
- Llamada Baño geriátrico
- Llamada emergencia

-N. PLANTA


-N. HABITACIÓN

Además cada tipo de llamada se anuncia mediante un tono acústico diferenciado.

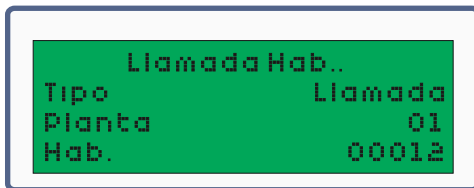


A continuación se incorporan como llamadas pendientes de atender

Ejemplo: Llamada normal desde Habitación 12.

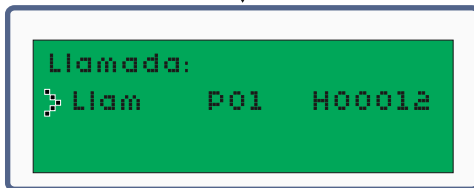


Si se efectua una nueva llamada, se presenta a continuación.

Ejemplo: Llamada de emergencia desde Habitación 15.

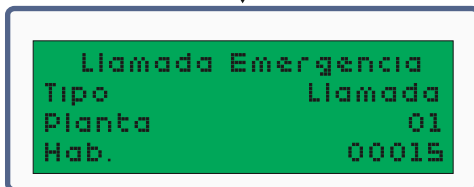

A continuación se incorporan a la lista de llamadas entrantes por orden de prioridad y de llegada, de mayor a menor.

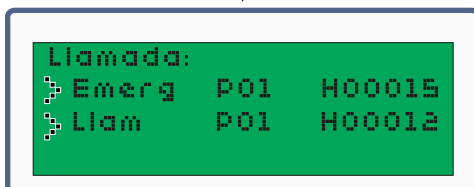


Ejemplo: incorporación de llamada de emergencia desde Habitación 15.






UTILIZACIÓN


ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS

```
Llamada:
Emerg P01 H00015
Llam P01 H00012
```

Para atender en el orden de la lista, bastará con pulsar cualquiera de las teclas de intercomunicación   /  ENTER

Si se desea seleccionar las llamadas en orden distinto al de llegada, Es posible desplazar el puntero hacia abajo    arriba o hacia arriba mediante las teclas

   abajo

A continuación validar pulsando  ENTER

```
Espera
```

```
Interf. Habitación
Planta 01
Habitación 12
APO: 47 Volum: 2
```

Para hablar pulsar   Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

Para terminar la comunicación pulsar la tecla  CANCEL

```
Espera
```

El display indica la **Espera** mientras se cancela la comunicación

```
Llamada:
Emerg P01 H00015
```


Volverá a la lista de llamadas no atendidas

```
04-09-13 18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1 (1)
```

Si no existe ninguna llamada no atendida, la pantalla vuelve a su posición de espera.

UTILIZACIÓN

LLAMADA DIRECTA A UNA HABITACION

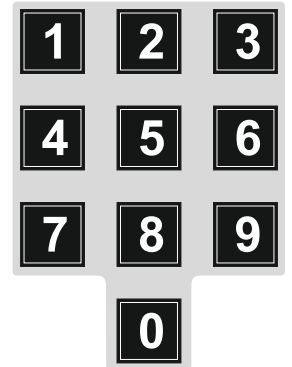

```
04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
```

Para seleccionar directamente una zona, teclear el número de EXTENSION, mediante el teclado numérico.

```
Extension.  _103
Num. de hab.
```

Aparece el nombre de la habitación asignado a la extensión marcada.

Ejemplo: llamada a Extension 103

A continuación validar pulsando. **D** **ENTER**

```
Conectando...
Planta      01
Habitacion  00003
```


El display indica **Conectando** mientras se realiza la comunicación

```
Interf.    Habitacion
Planta     01
Habitacion 3
APO: 40    Volum: 2
```

Aparece la pantalla de INTERFONIA en donde se indica:

- N. de Planta
- N. Habitación
- APO : Tiempo restante para la autodesconexión.
- Volumen escucha: Se puede modificar el nivel de escucha mediante las teclas 1 al 7 (en estado de intercomunicación)

Para hablar pulsar   Soltar para escuchar.

Para terminar la comunicación pulsar la tecla  **CANCEL**

```
Espera
```


El display indica la **Espera** mientras se cancela la comunicación

```
04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
```


A continuación vuelve al display de espera

UTILIZACIÓN


LLAMADA POR SELECCIÓN DE NOMBRE DE HABITACIÓN

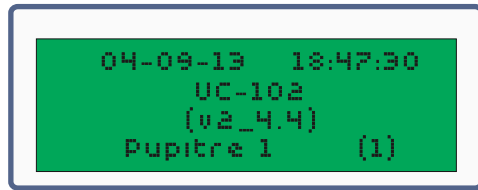

Abrir el menu desplegable de los nombres asignados a las habitaciones pulsando

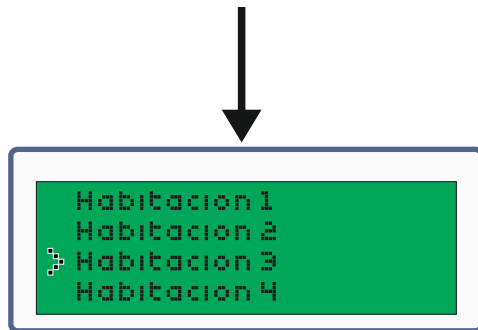


Buscar la zona a llamar, moviendonos en el menu hacia arriba o hacia abajo mediante los pulsadores

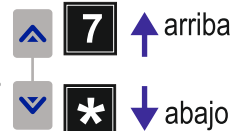


Seleccionar el nombre de la zona

Ejemplo: Habitación 3

A continuación validar pulsando

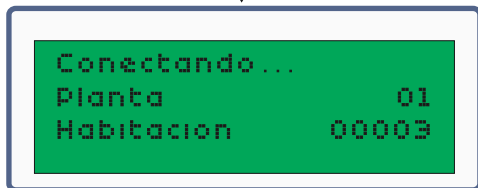


El display indica **Conectando** mientras se realiza la comunicación

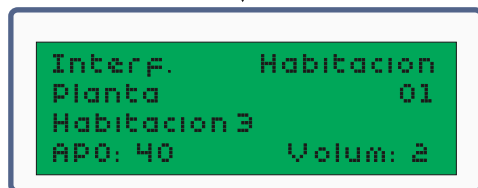


Aparece la pantalla de INTERFONIA en donde se indica:


- N. de Planta
- N. Habitación
- APO : Tiempo restante para la autodesconexión.
- Volumen escucha: Se puede modificar el nivel de escucha mediante las teclas 1 al 7 (en estado de intercomunicación)

Para hablar pulsar  Soltar para escuchar.

Para terminar la comunicación pulsar la tecla  CANCEL

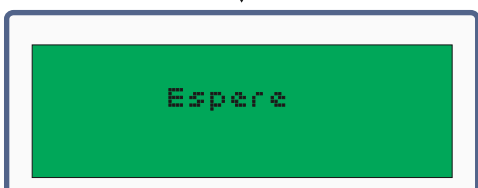

El display indica la **Espere** mientras se cancela la comunicación

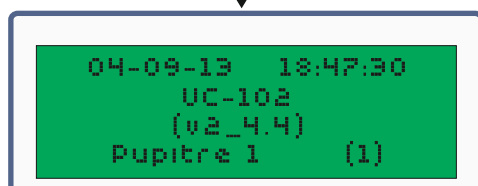

A continuación vuelve al display de espera

UTILIZACIÓN

PRESENCIAS



```


Presencia
Medico      001
Planta      01
Habitacion  00012
  
```


Cuando en una habitación se activa un código de presencia, en la pantalla del pupitre se indica momentaneamente:

- Persona que ha efectuado la presencia (Medico, Enfermera, Auxiliar Enfermera, Mantenimiento)
- Planta
- Habitación.

```

04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.3)
Pupitre 1  (1)
  
```

A continuación aparece el display de espera. El símbolo  indica que hay presencias activadas.


Para visualizar la lista de presencias pulsar   



```

+ Med 001 P01 0012
  Enf 001 P01 0013
  
```

Aparecen todas las presencia activadas

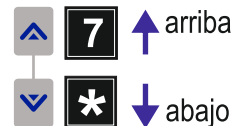Si queremos comunicarnos, seleccionar la presencia, moviendonos en el menu hacia arriba o hacia abajo mediante los pulsadores



A continuación validar pulsando  

```

Conectando...
Planta      01
Habitacion  00012
  
```

El display indica **Conectando** mientras se realiza la comunicación



```

Interf.    Habitacion
Planta     01
Habitacion 12
APO: 40    Volum: 2
  
```

Aparece la pantalla de INTERFONIA en donde se indica:

- N. de Planta
- N. Habitación
- APO : Tiempo restante para la autodesconexión.
- Volumen escucha: Se puede modificar el nivel de escucha mediante las teclas 1 al 7 (en estado de intercomunicación)

Para hablar pulsar   Soltar para escuchar.

Para teminar la comunicación pulsar la tecla  

```


Espere
  
```

El display indica la **Espere** mientras se cancela la comunicación

```

04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
  
```


A continuación aparece el display de espera.



El símbolo  indica que hay presencias activadas.


Nota: La presencias se visualizan en todos los pupitres del sistema y es posible la comunicacion con cualquiera de ellas desde todos los pupitres.

UTILIZACIÓN

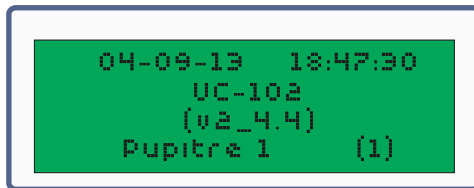CONFIGURACIÓN AJUSTES Y TEST DEL SISTEMA (RESERVADO AL SERVICIO TÉCNICO)



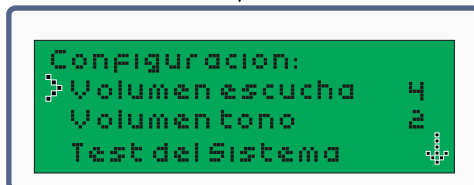

Pulsar la tecla  




Seleccionar la opción a configurar mediante  

"Volumen escucha"

Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.

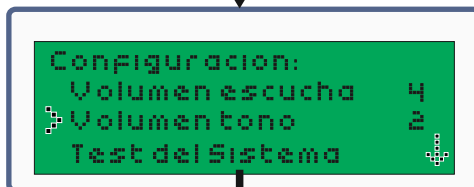

A continuación validar pulsando  




"Volumen tono"



Se escucha el tono de aviso de la llamada


Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.

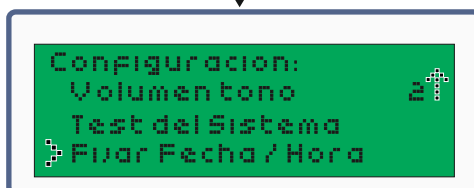A continuación validar pulsando  



"Fijar Fecha / Hora"

Pulsar la tecla  

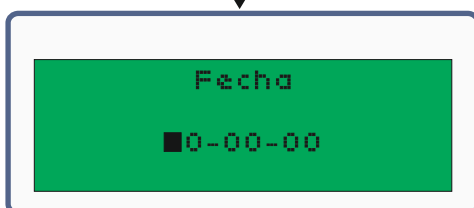

Fecha:

Entrar los datos de fecha con el formato **dd-mm-aa**.


Introducir los dígitos del **día** mediante el teclado numérico.

Validar con "Enter"  

Si deseamos corregir algún valor utilizar "Cancel"  

Proceder de igual manera con los dígitos del **mes** y del **año**.

Finalizar validando la fecha pulsando  

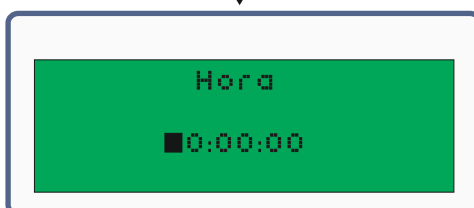

Hora:

Entrar los datos de la hora con el formato **hh-mm-ss**.

Introducir los dígitos de la **hora** mediante el teclado numérico.

Validar con "Enter"  


Si deseamos corregir algún valor utilizar "Cancel"  

Proceder de igual manera con los dígitos de los **minutos** y **segundos**.

Finalizar validando la fecha pulsando  


UTILIZACIÓN

CONFIGURACIÓN AJUSTES Y TEST DEL SISTEMA (RESERVADO AL SERVICIO TÉCNICO)

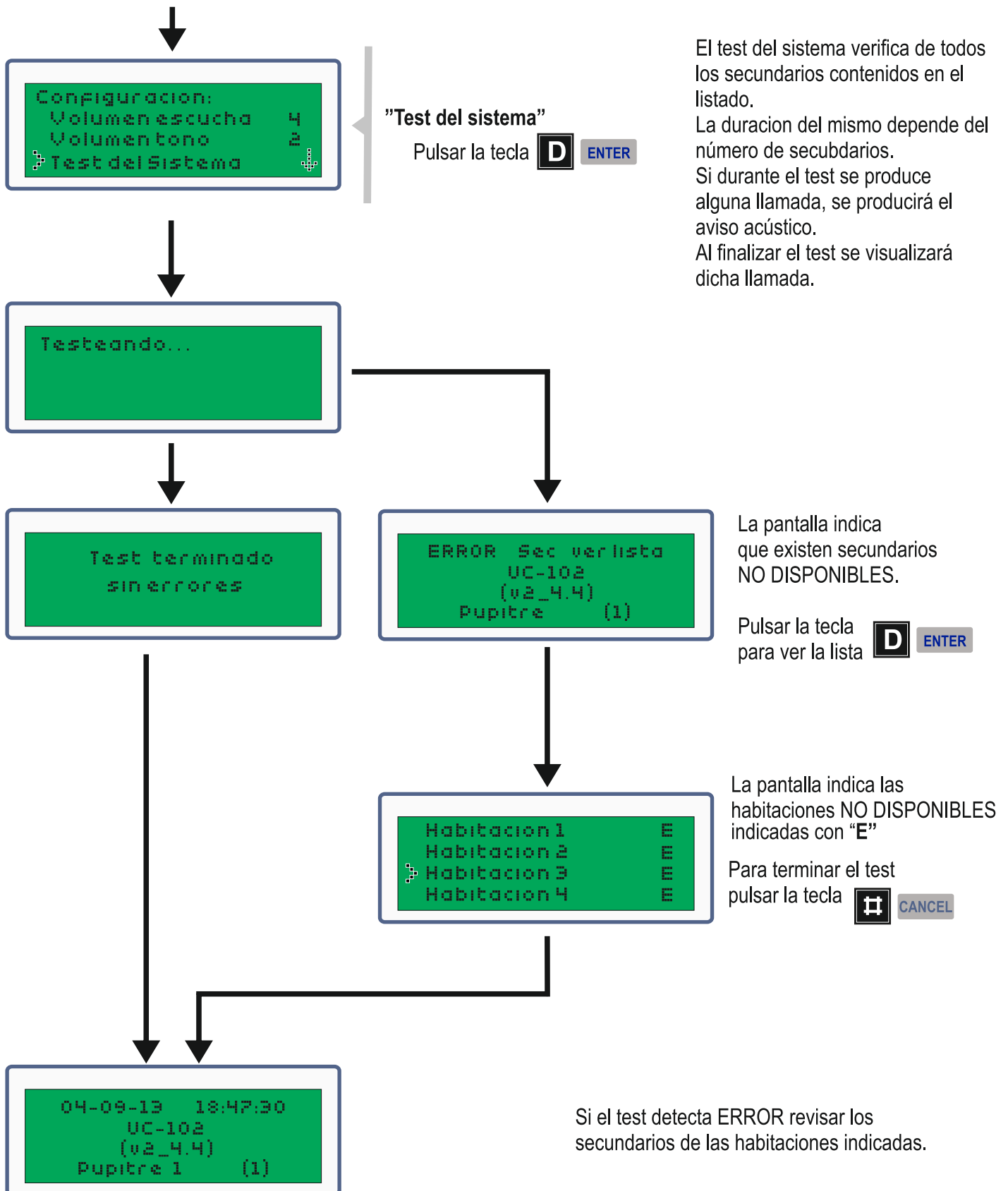

UTILIZACIÓN

DESVÍO DE LLAMADAS AL TELÉFONO

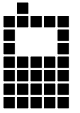

```
04-09-13 18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1 (1)
```

Pulsar la tecla **C** 

```
Anular desvío
Desvío UC-102
Desvío telefono
Desvío UC-104
```


Seleccionar la opción "Desvío a teléfono" mediante ***** **F**


A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

```
Espera
Desvío activado
```

```
04-09-13 18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1 (1)
```

A partir de este momento este pupitre queda inhibido, todas las llamadas entrantes y salientes se indicaran en el display pero deberán ser gestionadas desde el teléfono.

El icono  en la pantalla indica que las llamadas están desviadas al teléfono*.

Para anular el desvío pulsar la tecla **C** 

```
Anular desvío
Desvío UC-102
Desvío telefono
Desvío UC-104
```

Aparece seleccionada la opción "Anular desvío", a continuación validar con la tecla **D** **ENTER**

```
04-09-13 18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1 (1)
```

El desvío queda anulado y aparece la pantalla de espera

INTERFACE TELEFÓNICO UW-18

Si el interface telefónico SW-18 no está incorporado al intentar el desvío aparece la pantalla


```
Telefono no disponible
```

UTILIZACION

ATENCIÓN DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELEFONO




Para esta función se requiere un Interface Telefónico UW-18.

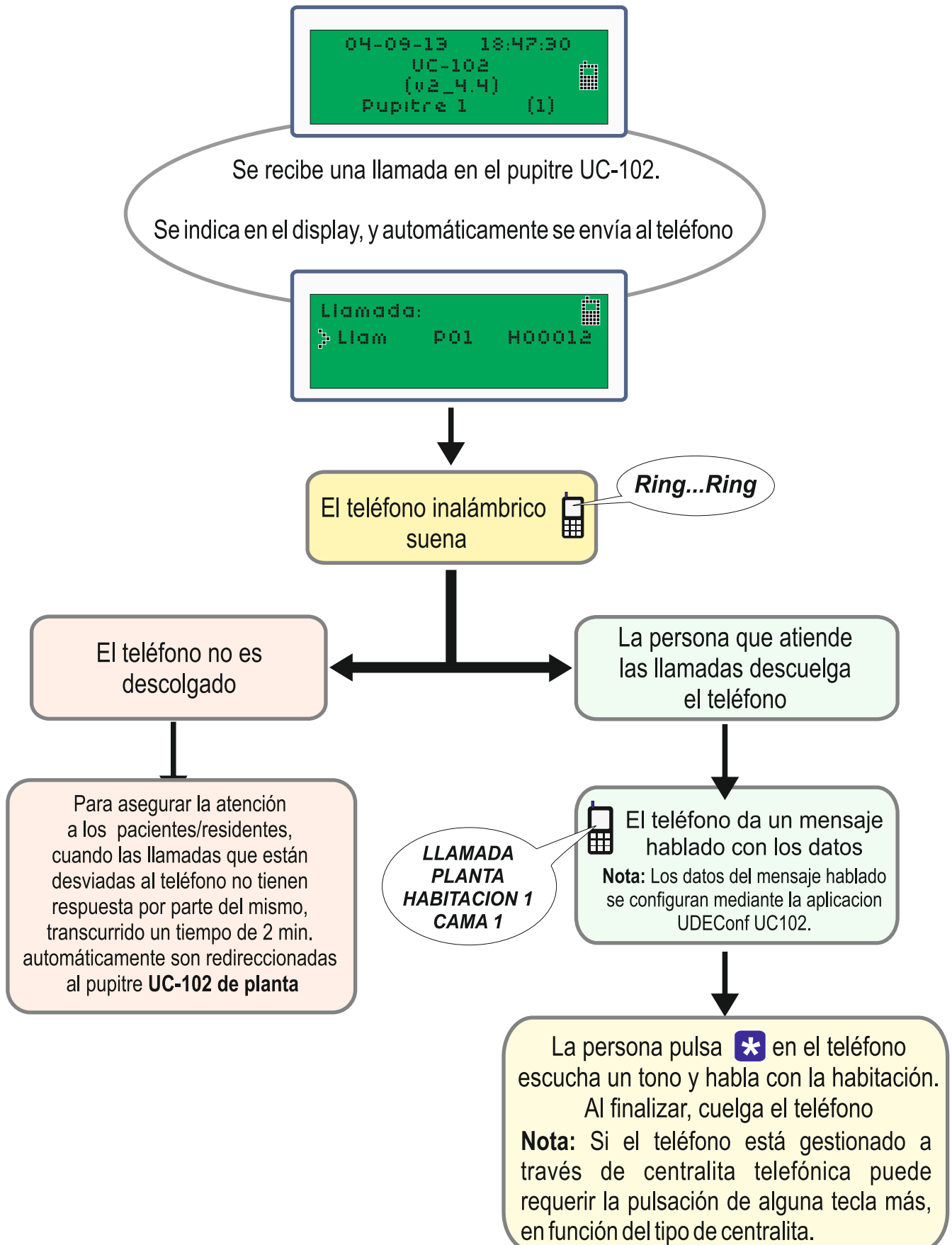

UTILIZACION

DESvío DE LLAMADAS A OTRO PUPITRE DEL SISTEMA

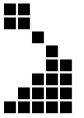

```



04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
  
```

Pulsar la tecla   

```

Anular desvío
Desvío UC-102
Desvío telefono
Desvío UC-104
  
```

Seleccionar la opción "Desvío UC-102" mediante  

A continuación validar pulsando  

```

Desvío UC-102
Identificador: _2
  
```

Mediante el teclado marcamos el número de pupitre al que efectuamos el desvío
Ejemplo: Desvío a pupitre 2

```

Espere
Desvío activado
  
```

Pantalla de espera del Pupitre al que efectuamos el desvío.

El icono **(D)** en la pantalla indica que ha recibido el desvío de otro pupitre.
Nota: El pupitre que recibe el desvío de otro pupitre, puede a su vez desviarlo al teléfono, pero no a otro pupitre.


```

04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre   (2)  (D)
  
```

A partir de este momento este pupitre queda inhibido, todas las llamadas entrantes y salientes se indicaran en el display pero deberán ser gestionadas desde el pupitre al que se a efectuado el desvío.

```

04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
  
```

El icono  en la pantalla indica que las llamadas están desviada a otro pupitre.

Para anular el desvío pulsar la tecla   

```

Anular desvío
Desvío UC-102
Desvío telefono
Desvío UC-104
  
```

Aparece seleccionada la opción "Anular desvío", a continuación validar con la tecla  


```

04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
  
```

El desvío queda anulado y aparece la pantalla de espera.

UTILIZACION

DESVIO DE LLAMADAS A SECUNDARIO UC-104

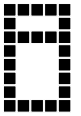



```
04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
```

Pulsar la tecla   

```
Anular desvio
Desvio UC-102
Desvio telefono
+ Desvio UC-104
```


Seleccionar la opción “Desvio UC-104” mediante  

A continuación validar pulsando  

```
Espera
Desvio activado
```


A partir de este momento, todas las llamadas entrantes y salientes se indicaran en el display pero pueden ser atendidas desde el secundario UC-104 que tenga una PRESENCIA activada

```
04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
```

El icono  en la pantalla indica que las llamadas están desviada a los secundarios UC-104.

Para anular el desvío pulsar la tecla   

```
+ Anular desvio
Desvio UC-102
Desvio telefono
Desvio UC-104
```




Aparece seleccionada la opción “Anular desvio”, a continuación validar con la tecla  

```
04-09-13  18:47:30
UC-102
(v2_4.4)
Pupitre 1  (1)
```


El desvío queda anulado y aparece la pantalla de espera

UTILIZACIÓN

ATENCIÓN DE LLAMADAS CON DESVÍO AL SECUNDARIO UC-104

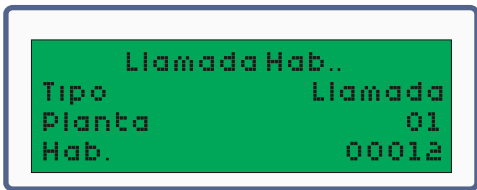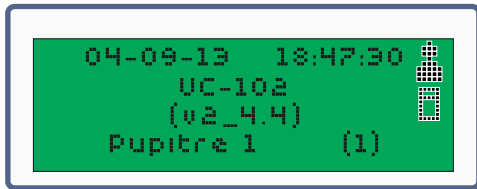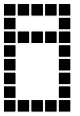

SECUNDARIO UC-104

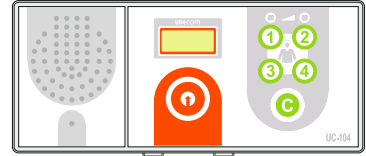




ejemplo: Habitación con presencia de enfermera

Mientras en el secundario UC-104 de una habitación está activada una presencia, si se efectúa una llamada en otra habitación, podrá oír un tono acústico, se indicará en la pantalla el tipo de llamada y el número de habitación que llama.


Además indica "Pulse 3".

Para atender la llamada :

- 3** Tecla "3". Pulsar para atender la llamada.
- 4** Tecla "4". Pulsar para hablar y soltar para escuchar.
- C** Tecla "C". Cancela la intercomunicación. El display vuelve a indicar la presencia.

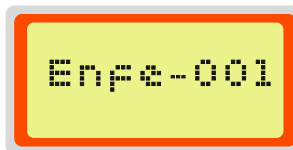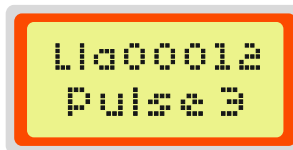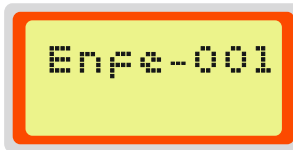

Si no hay ninguna PRESENCIA ACTIVADA en los secundarios UC-104, la llamada aparece en la central UC-102 aunque tenga el desvío activado para que sea atendida.

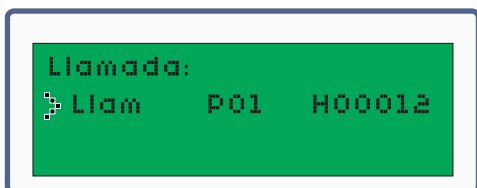

Nota 1: Si hay presencias activadas, pero no hay respuesta, el display irá rotando indicandonos las diferentes presencias.

Nota 2: El desvío al secundario UC-104 afecta independientemente a cada pupitre.