



Descripción


Kit de bucle inductivo para ser instalado en mostradores, mesas, recepciones, cajeros de entidades financieras y supermercados y taquillas de venta.

El kit de bucle inductivo se suministra con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

El bucle se sitúa en la parte externa del mostrador, perpendicular a la persona atendida, creando un pequeño campo magnético que es suficiente para que el sonido se transmita al audífono con posición "T" de forma clara, libre de perturbaciones y de ruidos ambientales que puedan causar confusión al oyente.


Las pequeñas dimensiones del amplificador WV-6LI permiten su montaje mural o de sobremesa.

El LI-5/K permite cumplir con las exigencias de accesibilidad de personas con discapacidades auditivas al ser atendidas por el personal de trabajo.

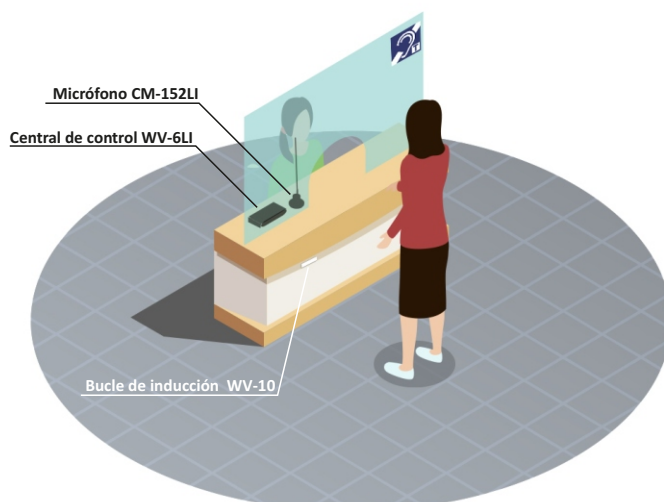

Composición

- 1 WV-6LI Central de amplificación y control.
- 1 CM-152LI Micrófono de sobremesa con On/Off
- 1 WM-103 Base de sobremesa
- 1 WV-10 Bucle de inducción audífonos "T"

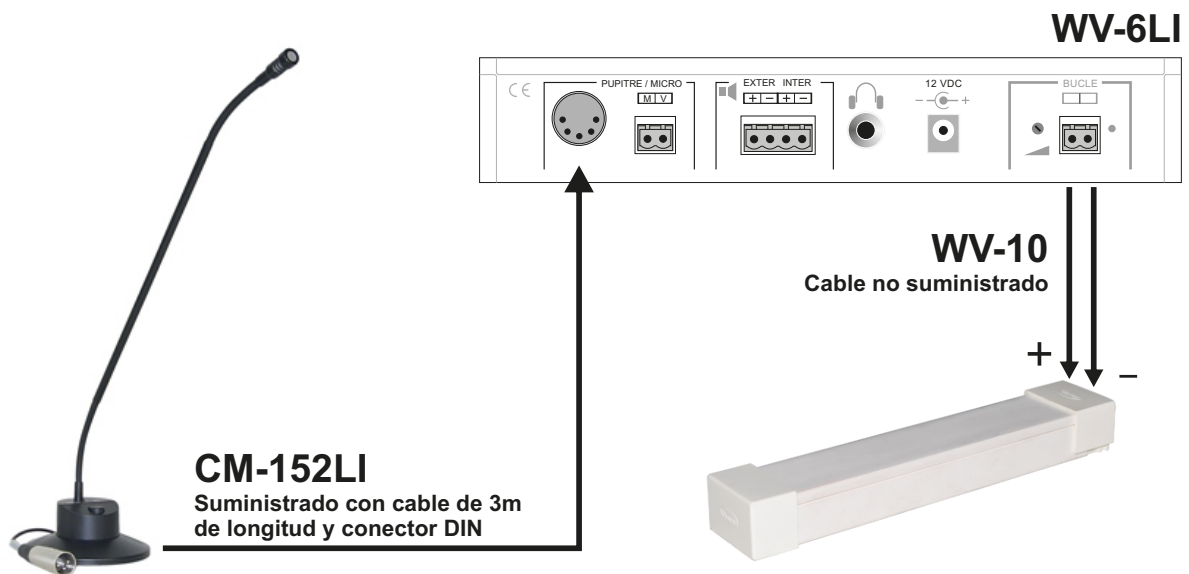

Puesta en marcha

Las condiciones de ruido ambiental han de ser las normales de uso del sistema.

- 1 Posicionar todos los potenciómetros de ajuste del panel frontal y del panel posterior al mínimo (girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj).
- 2 Posicionar el potenciómetro del panel posterior identificado como bucle aproximadamente a la mitad de su recorrido.
- 3 Poner en marcha la central WV-6LI mediante el interruptor de puesta en marcha . El piloto verde asociado ha de iluminarse.
- 4 Ajustar el volumen exterior, al tiempo que se habla frente al micrófono CM-152LI, hasta que el piloto indicador de modulación del bucle, situado en el panel posterior del WV-6LI, module.